

正在考虑 PARAGARD®?
(载铜宫内节育器)


PARAGARD® T380A intrauterine copper contraceptive



唯一一款 100% 不含激素的宫内节育器!

什么是 PARAGARD?

PARAGARD 是一种置于子宫内、可释放铜离子的避孕装置，其避孕有效期长达 10 年。它是一种避孕方式，被称为宫内节育器 (IUD)。

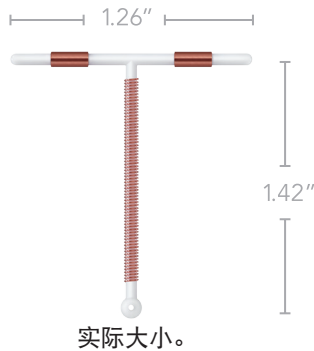

PARAGARD 工作原理

PARAGARD 是一种 T 型装置，主要由柔软有弹性的塑料以及铜制成。PARAGARD 中的铜增强了其有效性。它能干扰精子运动、卵子受精，也可能会阻止着床。PARAGARD 由医护专业人员在您常规看诊期间放置于您的子宫内。

PARAGARD 的费用为 \$0!

根据可负担保健法案 (Affordable Care Act) 的规定，符合条件的妇女可获得 PARAGARD，而无需支付共付额、自付额或其他现金。*

*请与您的保险提供商核实。



有效率高于 99% 且 100% 不含激素



根据您的决定，可随时由您的医护专业人员取出，无论在 1 年后还是 10 年后



如果您决定想要受孕，那么您可在医护专业人员取出 PARAGARD 的同一天开始尝试受孕



30 年来已有数百万妇女使用，并且获得了美国食品及药物管理局 (FDA) 的批准


重要安全信息

如果您患有盆腔感染，容易感染或患某种癌症，请不要使用 PARAGARD。低于 1% 的使用者发生被称为盆腔炎的严重感染。如果您有持续性骨盆痛或胃痛，或如果 PARAGARD 掉出体外，请告知您的专业医师。如果 PARAGARD 掉出体外，请使用备用避孕手段。

请参阅背面附加的重要安全信息以及随附的完整处方信息。

PARAGARD 提供 有效率高于 99% 且 100% 不含激素的避孕方式。

放置

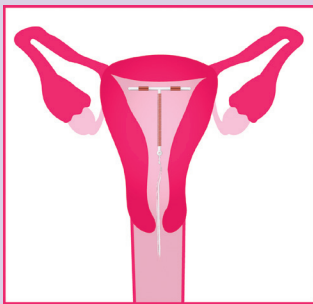

放置 PARAGARD 一般需要几分钟即可。此过程是非手术性质的，在您常规看诊期间由医护专业人员完成。

您可能会感到头晕、恶心、无力。医护专业人员可能让您平躺休息一会，然后再慢慢起身。在这个过程中，您也可能感觉到刺痛或痉挛。

当医护专业人员放置 PARAGARD 之后，您应该感觉不到它的存在。PARAGARD 安全地放置于您的子宫内，因此您仍然可以使用卫生棉塞，而且您的伴侣在性爱期间不会有任何感觉。

使用 PARAGARD, 您应该期待:

- 0 日常活动不受影响或避免补充购药的麻烦
- 1 每月进行系列检查
- 2 预约看诊 (以便准备开始)——一次是为了放置 PARAGARD，一次是在放置 PARAGARD 后约一个月，目的是确保 PARAGARD 放置在正确的位置*

*根据您的实际情况，可能需要额外约诊，以便确保 PARAGARD 处于正确的位置。

重要安全信息 (续)

PARAGARD 偶尔可能会粘附到子宫壁，或在罕见情况下可能会穿透子宫壁，并可能导致其他问题。在一些情况下，有必要采用手术方式将其取出。尽管很不常见，但是妊娠期间使用 PARAGARD 会危及生命并且可能导致流产或失去生育能力。在初期阶段，出血或点状出血现象可能会增多，但在 2 到 3 个月后会减少。**PARAGARD 不能预防艾滋病毒或艾滋病 (HIV/AIDS) 或性传播疾病 (STD)。**

仅可通过处方获得。

如果处方药物导致任何副作用，我们鼓励您通过网站 www.fda.gov/medwatch 或电话 1-800-FDA-1088 向 FDA 报告。

请参阅背面，了解更多安全信息。

请参阅随附的完整处方信息。